

Instrukcja pozyskania raportu danych z aparatów do bezdechu sennego YH firmy YUWELL.

Zgranie danych z pamięci aparatu na kartę miniSD.

1. Podłącz aparat CPAP do prądu.
2. Z tyłu aparatu znajduje się szczelina na kartę miniSD.
3. Włóż do szczeliny kartę miniSD zwracając uwagę, aby miedziane styki widoczne na karcie były skierowane w dół aparatu.
4. Po prawidłowym włożeniu karty na ekranie pojawi się napis „Odczyt lub zapis na karcie SD – proszę czekać.”, który oznacza początek transferu danych. Transfer danych trwa ok. 3-5 sekund.
5. Po zakończeniu zgrywania wszystkich danych na kartę miniSD na ekranie pojawi się napis „Odczyt na karcie SD zakończony - powodzeniem”.
6. Wyjmij kartę i zainstaluj program *BreathCare* na swoim komputerze.

Instalacja programu do odczytu danych *BreathCare*.

1. Pobierz plik instalacyjny z naszej strony internetowej. www.magmarmedyczny.pl w plikach do pobrania pod opisem aparatów firmy Yuwell. (<https://magmarmedyczny.pl/Bezdech-senny-CPAPy/Aparaty-CPAP/Aparat-do-bezdechu-sennego-CPAP-YH-360-firmy-Yuwell>).
2. Plik instalacyjny jest skompresowany za pomocą programu 7zip. Należy go rozpakować i zainstalować.
3. Po jego prawidłowym zainstalowaniu na pulpicie pojawi się ikonka programu *BreathCare*, jeżeli wybierzesz opcję, aby utworzyć skrót na pulpicie. W przeciwnym wypadku należy go szukać w zainstalowanych programach.

Wczytanie danych z karty miniSD do komputera

1. Włóż kartę ze zgranymi danymi do komputera, na którym jest zainstalowany program do odczytu danych *BreathCare*.
UWAGA – jeżeli na Twoim komputerze nie ma wejścia na kartę miniSD należy się zaopatrzyć w tzw. przejściówkę z wyjściem na port USB. Obecnie każdy komputer ma wejście na port USB.
2. Kliknij w ikonkę programu *BreathCare*, aby otworzyć program.
3. Na ekranie komputera pojawi się strona główna programu.
4. Na środku ekranu pojawi się zakładka „2.Download Data”.
5. Jak klikniemy myszką zakładkę „2.Download Data” na ekranie pojawi się okienko – Type Of BreathCare PAP – a w nim do wyboru – „Bi-Level PAP” i „CPAP/Auto CPAP”.
6. Podświetlamy i klikamy w „CPAP/Auto CPAP” – otwiera się okienko „Otwieranie” i w nim na lewym pasku „Dysk lokalny” – jeżeli korzystamy z wejścia na kartę miniSD lub „Dysk USB” jeżeli korzystamy z przejściówki z wyjściem na port USB i klikamy w wybrany Dysk.

7. Na ekranie pojawią się dwa pliki YHSD-NEW.BYS oraz YHSD-OLE.BYS. Wybieramy i klikamy myszką w plik YHSD-NEW,BYS i następuje automatyczne zgranie danych z przebiegu snu do programu.

Wydrukowanie raportu

1. Następnie kliknij w górną zakładkę „Report”, co spowoduje otwarcie się okna „Report Contents”.
2. Pojawi się „Date Period”, który umożliwi wybór czasu za jaki chcemy wydrukować raport. Najlepiej zostawić datę po prawej stronie bez zmian, a datę po lewej stronie zmienić na datę nie starszą niż ostatnie 6 miesięcy. Zaznaczamy również zakładkę „Detail Information”, aby raport obejmował również kilka ostatnich zapisów z bardziej szczegółowymi danymi i klikamy O.K.
3. Raport jest już gotowy do wydruku. W prawym górnym rogu kliknij zakładkę „Print”. Zostaniesz połączony z drukarką. Ustaw odpowiednie preferencje drukowania i kliknij O.K.
4. Raport zostanie wydrukowany.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami



+48 605 466 487



info@magmarmedyczny.pl



www.magmarmedyczny.pl